

Uputstvo za upotrebu

Anaftin® Gel

gel

Anaftin® Gel pomaže u otklanjanju bola koji nastaje usled sitnih lezija u ustima, kao što su lezije izazvane aftoznim stomatitisom, aftoznim ranama kao i sitnih lezija nastalih od korektivnih proteza i loše ugrađenih veštačkih vilica. Takođe je indikovano i kod difuznih aftoznih ulceracija.

Način delovanja:

Anaftin® Gel sadrži polivinilpirolidon (PVP) i hijaluronsku kiselinu koji formiraju zaštitni sloj koji oblaže usnu duplju i obezbeđuje mehaničku prepreku na bolnim mestima i na taj način ublažava bol koji izazivaju izloženi nervni završeci. Hijaluronska kiselina i aloe vera u njegovom sastavu pomažu prirodno zaceljivanje oštećenog tkiva.

Uputstvo za upotrebu:

Nanesite 1 do 2 kapi gela da bi prekrili ranicu ili leziju. Izbegavajte direktan kontakt aplikatora sa lezijom. Ne dodirujte leziju jezikom najmanje 2 minuta kako bi se formirao zaštitni sloj. Vratite poklopac nakon svake upotrebe. Za optimalne rezultate, izbegavajte hranu i piće sat vremena nakon primene.

Koristiti 3-4 puta na dan, ili češće po potrebi.

Sastav:

Aqua, polivinilpirolidon (PVP), maltodekstrin, propilen glikol, PEG-40 hidrogenizovano ricinusovo ulje, ksantan guma, kalijum sorbat, natrijum benzoat, natrijum hijaluronat, aroma, benzalkonijum hlorid, dinatrijum EDTA, natrijum saharin, dikalijum glicirhizinat, *Aloe barbadensis*

Oprez:

Jednu tubu Anaftin® Gel može koristiti samo jedan pacijent da bi se izbegla kontaminacija aplikatora i gela. Upotreba Anaftin® Gela je kontaindikovana kod pacijenata koji su preosetljivi na neki od sastojaka. Ukoliko ste u drugom stanju, posavetujte se sa lekarom pre upotrebe proizvoda. Ukoliko često patite od ranica u ustima, potražite savet lekara

Mera predostrožnosti i upozorenja:

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja ili ako primetite da je tuba oštećena ili curi. Čuvati van domašaja dece. Čuvati na sobnoj temperaturi daleko od direktnog izvora toplote. Ne zamrzavati.

Sadržaj

8 ml

Ovlašćeni predstavnik proizvođača:

BERLIN-CHEMIE A. MENARINI DISTRIBUTION D.O.O.
Đorđa Stanojevića 14, Beograd (Novi Beograd)

Proizvođač: Alliance Pharma Srl, Viale Restelli 5, 20124 Milano, Italija **CE 0477**

Distributeri:

-Farmalogist d.o.o.
Mirijeovski bulevar 3
11 060 Beograd, Palilula

-Vega d.o.o
Vuka Karadžića 41
14 000 Valjevo

-Phoenix pharma d.o.o.
Bore Stankovića 2
11 250 Beograd, Makiš

Broj rešenja o upisu u Registar medicinskih sredstava : 515-02-02757-17-001 od 08.01.2018.

BC logo