

Uputstvo za upotrebu

Anaftin® Baby gel kod nicanja zuba

gel

Anaftin® Baby gel kod nicanja zuba je bioadhezivni oralni gel. Brzo stvara nevidljivi sloj koji štiti desni od osećaja neprijatnosti i bola. Njegovi prirodni sastojci pomažu u ublažavanju bola i crvenila u zahvaćenim područjima.

Aplikator ima silikonsku četkicu koja nežno masira desni, dovodeći do ublažavanja osećaja neprijatnosti i simptoma povezanih s nicanjem zuba.

- SLIKA PROIZVODA -

Anaftin® Baby gel kod nicanja zuba ne sadrži lokalne anestetike, lekove, alkohol ni šećer.

Anaftin® Baby gel kod nicanja zuba ne izaziva osećaj pečenja prilikom primene, a takodje ima prijatan ukus banane.

Uputstvo za upotrebu:

Nanesite dovoljno gela da pokrije zahvaćeno područje i aplikatorom nežno izmasirajte desni.

Preporučuje se primena nakon obroka, kao i pre odlaska bebe na spavanje, kako bi se pospešilo stvaranje zaštitnog sloja i produžilo dejstvo na ublažavanje bola kod deteta. Koristite onoliko često koliko je potrebno. Nakon svake upotrebe ponovo zatvorite tubu. Uklonite sve ostatke proizvoda koji mogu smetati kod sledeće primene gela.

Sastav:

Aqua, polivinilpirolidon (PVP), maltodekstrin, propilen glikol, PEG-40 hidrogenizovano ricinusovo ulje, *Aloe barbadensis*, ksantan guma, aroma, kalijum sorbat, natrijum benzoat, dinatrijum EDTA, natrijum hijaluronat, ksilitol, cetilpiridinium hlorid, gliciretinska kiselina, *Crocus sativus*

Oprez:

Svaku tubu Anaftin® Baby gela kod nicanja zuba treba da koristi samo jedna osoba, kako bi se izbegla uzajamna kontaminacija aplikatora i gela.

Primena Anaftin® Baby gela kod nicanja zuba je kontraindikovana kod osoba sa poznatom preosetljivošću na bilo koji od sastojaka. Ukoliko ste u drugom stanju posavetujte se sa lekarom pre upotrebe proizvoda.

Mere opreza i upozorenja:**OPREZ:**

Proizvod može nanositi isključivo odrasla osoba.

Ovo medicinsko sredstvo nije igračka! NIKADA ga ne ostavljajte u rukama deteta. Postoji opasnost od gušenja!

Pre upotrebe proverite ima li na medicinskom sredstvu znakova istrošenosti i vodite računa o tome da se tokom primene gela nijedan deo glave aplikatora slučajno ne odvoji. Ako se to dogodi, prestanite da ga koristite.


Nemojte pokušavati da ponovo sastavite odvojeni deo.

Prestanite sa korišćenjem medicinskog sredstva kada se gel potroši.

Nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe ili ako tuba ima vidljivo oštećenje ili iz nje curi. Čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od izvora toplote.

Ne zamrzavati.

Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

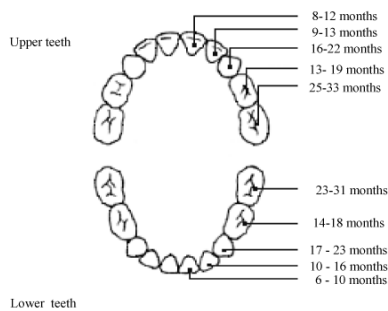

Gornji zubi	8-12 meseci
	9-13 meseci
	16-22 meseca
	13-19 meseci
	25-33 meseca
Donji zubi	23-31 mesec
	14-18 meseci
	17-23 meseca
	10-16 meseci
	6-10 meseci

Sadržaj:

10 ml

Ovlašćeni predstavnik:

BERLIN-CHEMIE A.MENARINI DISTRIBUTION D.O.O.
Beograd-Novi Beograd, Djordja Stanojevića 14

Proizvođač: Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, Milano, Italija

CE 0373

Distributeri:

-Farmalogist d.o.o.
Mirijevski bulevar 3
11 060 Beograd, Palilula

-Vega d.o.o
Vuka Karadžića 41
14 000 Valjevo

-Phoenix pharma d.o.o.
Bore Stankovića 2
11 250 Beograd, Makiš

Broj rešenja o upisu u Registar medicinskih sredstava: 515-02-04278-20-004 od 26.10.2020.

Datum revizije 10/2020

Logo Berlin-Chemie